

**OXY PHARM®**

Desinfiser et helt rom og inventar  
ved å trykke på en knapp! \*)



# NOCO SPRAY

new generation

- Kompakt og brukervennlig desinfeksjonsrobot med høy kapasitet og veldokumentert effekt.
- For økt sikkerhet og en enklere hverdag.
- Rask og økonomisk.

[www.bragemedical.no](http://www.bragemedical.no)

## Hva er Nocospray?

Nocospray er en særdeles kompakt desinfeksjonsrobot som med en turbin omdanner hydrogenperoksid (Nocolyse) til gass og tilintetgjør alle typer mikroorganismer. Hydrogenperoksid er en velkjent og effektiv oksidant og blir i kombinasjon med Nocospray en meget effektiv metode for desinfeksjon av rom, flater og utstyr.



Den bakteriedrepende virkningen til Nocospray/Nocolyse skyldes ikke bruken av hydrogenperoksid som sådan, men fremstillingen av  $\text{OH}^-$  radikaler som overfører sine elektroner til bakteriens membran og endrer dens polaritet. Elektropositiviteten av meget lave doser av sølv (brukt som katalysator) fører til at peroksidet umiddelbart blir omdannet til hydroksylradikaler som med sine uparede elektroner i en ellers åpen skallkonfigurasjon er svært reaktive. Det skjer så en oksidasjon av karbonbindingene i celledmembranen og cellen ødelegger seg selv.

### Ingen resistens:

Nocospray/Nocolyse fører til at bakterier ødelegger seg selv. Derfor kan konseptet brukes daglig uten å frykte noen form for bakteriell resistens.

### Dokumentert effekt:

Effektiv mot bakterier, virus, sopp og sporer i henhold til Europeiske standarder. Rapporter og studier fås ved henvendelse til leverandør.

### Testet mot følgende standarder:

#### Bactericidal activity

- NF EN 1276

#### Virucidal activity

- NF EN 14476

#### Sporicidal activity

- NF EN 13704

#### Fungicidal activity

- NF EN 1650

#### Combined tests

- NF EN 13697
- NF T 72-281

Godkjent av Statens Legemiddelverk (SLV)  
Sertifisert etter NF T 72 281 standard

## FORDELER:



Rask klargjøring og kort diffusjonstid. Ned mot 30 minutters virketid



Fjerner alle typer mikroorganismer med opp til 6-LOG reduksjon. Sertifisert etter NF T 72 281



Svært enkel i bruk. Still inn romvolum og trykk start.



Veier bare 6 kg. Kan likevel desinfisere rom opp mot 1000 m<sup>3</sup>



Ikke-allergent produkt som brytes ned til oksygen og vann.

## \*) Meget enkel i bruk!

Skru nesestykket fast til flasken med ønsket desinfeksjonsløsning ① og klikk denne på plass i maskinen ②. Still inn romvolum og trykk inn start-knappen ③. Forlat rommet. Nocospray starter etter 15 sekunder og stopper automatisk når rommet er ferdig desinfisert. Det er i de aller fleste tilfeller **ikke** nødvendig å stenge ventilasjonen eller tape/forsegle dører. Det er heller **ikke** nødvendig å dekke til Brannalarmer/-sensorer.



## Hver kvadratcentimeter blir behandlet!

Gassen som Nocospray produserer kommer til overalt. Åpne skapdører og dra ut skuffer før behandling, og gassen vil desinfisere innsiden. Gardiner kan henge, og disse vil også bli desinfisert.

## Høy kapasitet

Til tross for den moderate størrelsen har Nocospray kapasitet opp til 1000 kubikkmeter. Det tilsvarer et rom på 400 kvadratmeter dersom takhøyden er 2,5 meter.

## Høy fleksibilitet og mobilitet

På grunn av sin lave vekt, kompakte størrelse og et hendig bærehåndtak er det lett å flytte Nocospray fra et rom til et annet – eller mellom avdelinger og bygninger. Det finnes også smarte løsninger for de som ønsker et fastmontert system eller vegg-gjennomføring.


## Enkelt vedlikehold

Maskinen har en oversiktlig oppbygging med relativt få komponenter. Vedlikehold og reparasjoner kan foretas på stedet. Et enkelt service-/vedlikeholds-kurs, samt et begrenset utvalg deler er tilstrekkelig for å sikre kontinuerlig drift.

## TESTER:

### NOCOBX

Skåler til prøvetaking på flater for å vise tilstedeværelse av mikroorganismer – og påfølgende effekt av Nocospray robot.

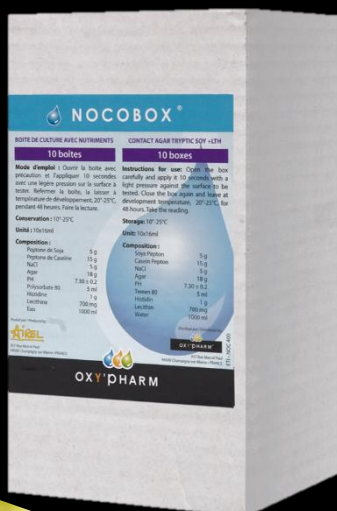

### NOCOSTRIPS

Kolorometriske strips til kontroll av jevn og tilstrekkelig distribusjon av gass i behandlet rom.



# Bestillingsinformasjon

Slik velger du den roboten som passer best til dine behov:

1. Velg farge/design
2. Velg fjernkontroll
3. Velg middel



Nocospray Ladybird  
Art nr. 2001.001



Nocospray, standard hvit  
Art nr. 2000.001



Fjernkontroll  
Art nr. 3010.611

## Desinfeksjon:



**Nocolyse  
Neutral (6 %)**

Art nr. 4000.001

Til forebygging  
og rutinemessig  
desinfeksjon



**Nocolyse One  
Shot (12 %)**

Art nr. 4010.001

Ved påvist smitte  
eller mistanke  
om smitte



**Nocolyse  
Food (7,9 %)**

Art nr. 4020.001

Til desinfeksjon  
av rom og flater  
som er i kontakt  
med mat

## Insekticider:



**Oxypy**

Art nr. 4200.001

Til flygende og  
krypende  
insekter (også  
skabbmidd)



**Oxypy +**

Art nr. 4230.001

Spesielt til  
veggdyr. Dreper  
også larvene

## Luktfjernere:



**Nocodor  
(6 %)**

Art nr. 4030.001

Til desinfeksjon  
og fjerning av  
lukt



**Oxydor**

Art nr. 4300.001  
Luktfjerner

Din forhandler i Norge:

**Brage**  
MEDICAL

**Brage Medical AS**

Postboks 341 Bragerne, 3001 Drammen

Epost: [info@bragemedical.no](mailto:info@bragemedical.no)

Tel 32 83 59 00